



วิธีปฏิบัติ การทำความสะอาดและ ตรวจสอบอุปกรณ์เปล-รถนั่ง



วัตถุประสงค์

เพื่อการดูแลอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เปล-รถนั่ง) ให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานคงทนและสะอาดสวยงามอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำจัดการบสกปรกและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และไม่เกิด ความเสี่ยงในระหว่างใช้งาน

อุปกรณ์/เครื่องมือ

1. น้ำยาทำลายเชื้อ 0.5% hypochlorite (Virkon)
2. ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด
3. ถังน้ำ
4. ถุงมือ - ผ้าปิดจมูก (Mask)
5. เสื้อคลุมกันเปื้อน



การเตรียมความพร้อม

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ถังน้ำ, น้ำยาทำลายเชื้อ 0.5% hypochlorite (Virkon) และผ้าทำความสะอาด
2. สวมถุงมือ และเสื้อคลุมกันเปื้อน
3. ผสม Virkon ขนาด 5 กรัม 1 ซอง กับน้ำประปาสะอาด 1 ลิตร

การทำความสะอาด

1. หลังจากผสมน้ำยาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น เช็ดขัด ถู อุปกรณ์ต่าง ๆ จนทั่ว

เปลนอน ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำลายเชื้อ 0.5% hypochlorite (Virkon) เช็ดตัวเปล ที่กันข้างเปล ขอบเปล ที่วางของใต้เปล ขอบวงล้อ เสา น้ำเกลือ ที่ล็อกล้อเปล และเบาะเปลนอน เป็นต้น



รถนั่ง ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำลายเชื้อ 0.5% hypochlorite (Virkon) เช็ดตัวรถนั่ง ที่นั่ง พนักวางแขน พนักพิงหลัง พนักวางเท้า วงล้อ เสา น้ำเกลือ ด้ามจับรถนั่ง กระเป๋ารถนั่ง ด้านหลัง เป็นต้น

2. เมื่อเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาทำลายเชื้อ 0.5% hypochlorite (Virkon) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้น เช็ดตามด้วยผ้าแห้งและจัดวางให้เป็นระเบียบ

การตรวจสอบ

การตรวจสอบความสะอาด

กรณีเปล-รถนั่ง มีคราบเลือด สารคัดหลั่งจะนำเปล - รถนั่งมาล้างด้วยน้ำยาทำลายเชื้อ 0.5% hypochlorite (Virkon) และทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดตามปกติจนสะอาด เช็ดด้วยผ้าสะอาด ผึ่งให้แห้งตามปกติพร้อมจัดเตรียมให้เรียบร้อย

การตรวจสอบความพร้อมใช้งานรถนั่ง

1. รถนั่งทั้งคันไม่มีขบคม หรือส่วนใดหักขาด ขำรถนั่งเคลื่อนที่ได้ในแนวตรง
2. ล้อหน้าและล้อหลังหมุนโดยอิสระไม่สัมผัสตะเกียบ และตะเกียบหมุนได้ น็อตยึดแกนล้อ ชันแน่น ชีลวดมั่นคง
3. เบรกทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
4. ที่พักเท้ายึดได้อย่างมั่นคง
5. โครงรถนั่งสามารถพับและกางได้โดยง่าย
6. ปกคลุมด้ามจับไม่เสื่อมหลุด/เสียหาย

การตรวจสอบความพร้อมใช้งานเปลนอน

1. ตรวจสอบสภาพเปล-รถนั่ง ไม่ให้มีเสียงรบกวนขณะเข็น
2. ล้ออยู่ในสภาพดี ไม่สะบัด สั่น หรือเสียดู่นัย
3. มีเสาแขวนน้ำเกลือและที่ใส่ออกซิเจนพร้อมใช้งาน
4. ที่เบรกข้อใช้งานได้ดี
5. ตัวเปลทั้ง 2 ข้างต้องมีที่กันเปลที่แข็งแรง