



การทำความสะอาด Laryngoscope

ด้วย 4% chlorhexidine

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
18 มกราคม 2560



การทำความสะอาด Laryngoscope

1) ทำความสะอาด laryngoscope blade ด้วย 4% chlorhexidine ทุกครั้งหลังใช้งาน และอย่างน้อยทุก 1 เดือน

1.1 laryngoscope blade

- เช็ดคราบสกปรกและคราบเลือดออกก่อน ใช้แปรงขนนุ่มชุบ 4% chlorhexidine แปรงบริเวณซอกมุม ล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้ง
- เช็ดด้วย 70% alcohol รอให้แห้ง
- เก็บในถุงซิปล็อคหรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว และเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด
- เช็ดด้วย 70% alcohol ก่อนใช้งานทุกครั้ง

1.2 laryngoscope handle

- เช็ดด้วย 70% alcohol รอให้แห้ง และเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด



การทำความสะอาด laryngoscope

การเก็บในซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว



ถุงซิปล็อค

ขนาด 11x18 ซม.

(ใบเบิกสำเนาจากคลังยา ตึกเภสัชกรรม)





การทำความสะอาด laryngoscope

ล้างด้วย 4%
chlorhexidine

เก็บในถุงซิปล็อกหรือซองพลาสติก
สะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว
และเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

